




Steel

Surt specialrengöringsmedel

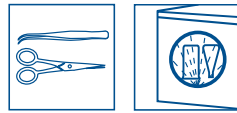

Surt specialrengöringsmedel för borttagning av kalk- och rostavlagringar samt oxidhinnor från sjukvårdens instrument och diskmaskiner.

Användningsområde	Specialprodukt för instrument och diskmaskinsvård: Lämpligt för manuella och maskinella metoder, även för användning i ultraljudstvättar. För rostfritt stål, plast, silikonmaterial, de flesta aluminium-, mässing- och kopparmetaller.	
	För professionell användning.	
Produktegenskaper	Steel är en specialprodukt för borttagning av ytliga kalk- och rostavlagringar samt oxidhinnor från instrument och diskmaskiner. Tar även bort fläckar från silikon- och plastytor. Steel gör metallytor blanka. Produkten är lätt att skölja bort.	
Bruksanvisning	<p>Rengöring av instrumentdiskmaskin: 100–300 ml (utspädning 0,5–1,5 %), avkalkningsprogram. Säkerställ att inga andra diskmedel används samtidigt. Rengöring av instrument: 20 % lösning (2 dl/0,8 l vatten) i varmt vatten, blötläggningstid 30–60 min.</p> <p>Vid avlagringsrester, torka ytan. Tvätta och skölj instrumenten direkt efter blötläggning.</p> <p>I ultraljudstvätt: 20–200 ml/1–0,8 l varmt vatten. Blötläggning av instrument 30 minuter, varefter ett 10 minuters program med noggrann sköljning.</p>	
Obs	Lösningen som används ska bytas ut dagligen. Produkten är sur. Får inte blandas med klorhaltiga medel. För att undvika frätningsskador får produkten inte torka på ytorna.	
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Organiska syror	15-30 % löser upp avlagringar
	Glykoleter	5-25 % lösningsmedel, förbättrar rengöringseffekten
	Nonjoniska ytaktiva medel	< 5 % ytfuktare, aktivt tvättämne
pH koncentrat	1.5 starkt sur	
pH brukslösning	3.0 sur	
Utseende och doft	Klar vätska, karaktäristisk doft	
Tillverkningsland	FINLAND	
Användar- och miljösäkerhet	Allvarliga tillbud orsakade av Steel surt specialdiskmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).	

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 1 l

8224

6417964082241

6417964482935



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.