

# Activon Tube

100% medicinsk manukahonung



## Produktinformation

Activon Tube innehåller 100% medicinsk Manukahonung. Antiseptisk och antiinflammatorisk. Elimineras även lukt från illaluktande sår. Manukahonung har lågt pH-värde (3,2-4,5) vilket sänker pH-värdet i såret så att bakterier inte trivs eller förökar sig. Osmotisk effekt renar och rensar bort skadad och död vävnad. Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö.

## Indikationer

- Djupa sår
- Kraftigt infekterade sår
- Trycksår
- Operationssår
- Nekrotiska sår
- Brännskador, typ 1 och 2
- Illaluktande sår
- Transplantations- och donatorsår

## Användarinstruktioner

- Se till att såret har rengjorts
- Torka försiktigt den omgivande huden
- Ta ur den sterila tuben från förpackningen, skruva av korken
- Applicera rikligt på sårbädden (yta eller kavitet)
- Täck med lämpligt sekundärförband
- Endast för engångsbruk per patient
- Förvaras i rumstemperatur
- Använd inom 90 dagar efter öppnandet



**Hållbarhet:** 90 dagar efter öppnad tub

**Innehåll:** 100% medicinsk manukahonung, MGO $\geq$ 263 mg/kg, UMF $\geq$ 10

## Orderinformation

Art.nr	Benämning	Storlek	Avd. fp	Trp. fp	Klass
CR4493	Activon Tube	20g	12	240	MD IIb, steril
CR3830	Activon Tube	25g	12	240	MD IIb, steril