

# Actilite

Viskosnät impregnerat med medicinsk manukahonung



## Produktinformation

Actilite viskosnät verkar antiseptiskt och antiinflammatoriskt. Utformat för att skydda såret, främja sårhäkning och möjliggöra passage av sårexsudat. Kan med fördel användas på ytliga sår i aktiv läkprocess. Actilite tillför en skonsam mängd Manukahonung och håller såret skyddad från bakterier och infektioner. Tunt viskosnät impregnerat med 99% medicinsk manukahonung och 1% manukaolja.

## Indikationer

**Kan användas på alla typer av sår**

- Ytliga sår t.ex. skär- och skrubbsår
- Infekterade sår
- Bensår
- Operationssår
- Nekrotiska sår
- Brännskador, typ 1 och 2
- Illaluktande sår
- Transplantations- och donatorsår

## Användarinstruktioner

- Se till att såret har rengjorts
- Torka försiktigt den omgivande huden
- Ta ur förband från förpackning
- Placera förband (uppåt eller nedåt) på sårytan
- Kan placeras sida vid sida vid större områden eller klippas till önskad storlek
- Täck med lämpligt sekundärförband
- Förvaras i rumstemperatur

## Förbandsbyte

Actilite kan lämnas på plats i upp till 7 dagar. Actilite kommer att vara mindre effektivt när honungen blir utspädd av sårexsudat, för att upprätthålla effektiv nivå bör du byta förband när färgen på förbandet ändras avsevärt.



**Hållbarhet:** 2 år i obruten förpackning

**Material:** Viskosnät, 99% medicinsk manukahonung, 1% manukaolja

## Orderinformation

Art.nr	Benämning	Storlek	Avd. fp	Trp. fp	Klass
CR4281	Actilite	5x5cm	10	400	MD IIb, steril
CR3849	Actilite	10x10cm	10	540	MD IIb, steril
CR3852	Actilite	10x20cm	10	270	MD IIb, steril