

Kirurgisk Clipper

Bruksanvisning

Att använda Kirurgisk Clipper



1. Fäst bladet

Med handskar, fäst på bladet på Clippers huvud. Detta kan göras direkt från förpackningen. Tryck bladet bakåt i pilarnas riktning tills du hör ett klick.



2. Håravkortning

Håll Clippern med ett penngrepp eller överhandsgrepp med CareFusion loggan uppåt. Sträck huden, håravkorta genom att låta bladet glida jämt över huden mot hårets växtriktning.



3. Avlägsna bladet

Stäng av Clippern, håll klipparen med CareFusion loggan nedåt och tryck av bladet framåt med tummen längst med bladramen tills den lossnar.



4. Rengöring av Clippers handtag

Rengör med rengöringsmedel och vatten, desinficera därefter med ytdesinfektionsmedel. Får även nedsänkas i vatten eller rengöringslösning i högst 30 minuter.*



5. Laddning och förvaring

Placera Clippern i upprätt position i laddningsstationen. Lithiumbatteriteknologin underlättar lång användningstid och ökad energieffektivitet. Batteriindikator förvarnar användaren när det är dags att ladda enheten **.

Kom ihåg:

- Våt klippmetod rekommenderas för att förhindra spridningen av luftburna hudceller och lösa hårstrån som kan förorena operationsområdet.
- Vid håravkortning, håll huden spänd med ena handen för att säkerställa en jämn hudytta för håravkortning. Denna teknik är speciellt viktig vid håravkortning på områden med lösare hud. Var särskilt noga med hudflikar och andra ojämnheter i huden.
- Låt alltid klipparbladet vila plant på patientens hud. Ändra inte vinkeln på bladet i försök att klippa närmare huden.
- Håll ett fast grepp i handtaget. För Clippern noggrant över området som ska klippas för att få en jämn och precis håravkortning på första försöket.
- För Clippern bort från dig med en jämn och lätt rörelse. För inte Clippern mot dig över patientens hud och använd aldrig mer kraft än nödvändigt.



För instruktionsvideo, se: <http://www.carefusion.com/our-company/video-gallery?video=3188431177001>

bd.com

Becton Dickinson AB, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm
Tel: 08-775 51 60 E-mail: bdsweden@bd.com
SE556145-6756

© 2017 **BD** and BD Logo är varumärken som tillhör Becton Dickinson and Company. 2017.5

Instruktionen gäller samtliga kirurgiska Clippers

* Kirurgisk Clipper kan rengöras med mildt desinfektionsmedel eller desinfektionswipes. Desinfektionsmedel innehållande bensylalkohol kan förorsaka kemisk skada på ytan av Clippern och laddningsstationen. Detta kan leda till att garantin blir ogiltig. Nedsänkning i vatten eller annan rengöringslösning upp till en meter djup och max 30 minuter.

** Det är rekommenderat att koppla ur laddaren från strömkällan när det fasta orangea ljuset slocknar, vilket indikerar att enheten är fulladdad.

