



Kiilto Pro Erinox

Specialrengöringsmedel



Specialrengöringsmedel för handtvätt av instrument och endoskop inom sjukvård, instrument inom tandvård samt till ultraljudsrengörare.

Användningsområde	Till ultraljudsrengörare, för förtvätt av endoskop, instrument, vårdutrustning, laboratorieinstrument, ömtåligt glasgods		
Produktegenskaper	Lösgör effektivt orenheter och fet smuts. Även utmärkt för rengöring av ömtåliga material. Låglöddrande specialrengöringsmedel för rengöring av instrument och vårdutrustning för hand och i ultraljudsrengörare. Medicinteknisk produkt. För professionell användning.		
Bruksanvisning	Blanda utspädd brukslösning enligt anvisning. Lösningen ska bytas ut dagligen. Vid rengörning för hand, ska den utspädda brukslösningen blandas skilt för varje underhållsåtgärd. Desinficera redskapen vid behov före tvätten. Rengjorda redskap sköljs och torkas. Placera redskapen luftigt i ultraljudsrengöraren, tvättemperatur beroende på typen av smuts, max. 50 °C. Skölj redskapen efter tvätt.		
Obs	Desinficera redskapen vid behov före tvätten. Byt ut den utspädda brukslösningen varje dag. Vid handtvätt ska den utspädda brukslösningen blandas skilt för varje underhållsåtgärd.		
Sammansättning	Aktiva ämen		Effekt
	Nonjoniska yttaktiva medel	< 5%	rengöringseffekt
	Polykarboxylat	<5%	Dispergerar smuts, komplexbildare
pH koncentrat	10.0 svagt alkaliskt		
pH brukslösning	10.0 svagt alkaliskt		
Utseende och doft	Klar vätska		
Tillverkningsland	FINLAND		
Användar- och miljösäkerhet	Allvarliga tillbud orsakade av Erinox specialtvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).		

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 1 l	8113	6417964081138	6417964483536
3 x 5 l	8114	6417964081145	6417964483543
1 x 200 l	8148	6417964081480	



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.