





# Sekusept® Aktiv


## Manuell rengöring och desinfektion av instrument och flexibla endoskop

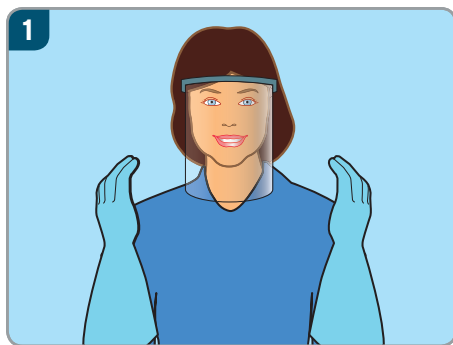


1 Använd alltid rekommenderade handskar och ögonvisir under hela processen.

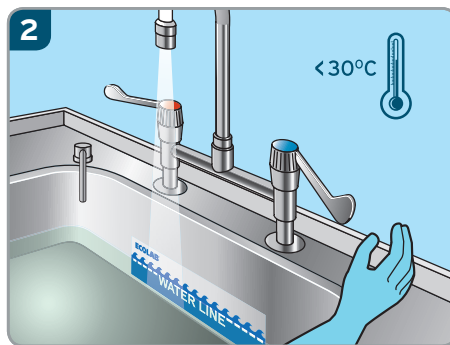


2 Fyll upp vasken med vatten <30 °C till nivåmärket.

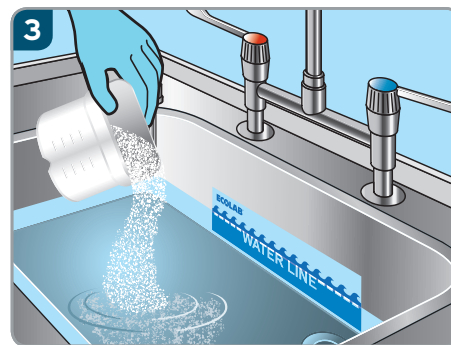


3 Tillsätt rekommenderad mängd pulver i vattnet.

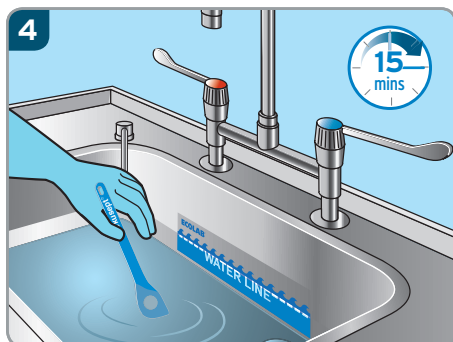

4 Rör om flera gånger under 15 minuters tid. Lösningen är sedan färdig att användas.

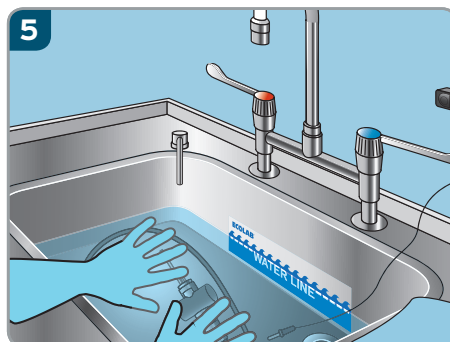

5 Lägg ner instrument i lösningen och se till att alla ytor är helt täckta, inkl. kanaler och andra ihåliga utrymmen. Utför nu den manuella förrengöringen. Upprepa steg 1-5 för desinfektion av instrumentet.

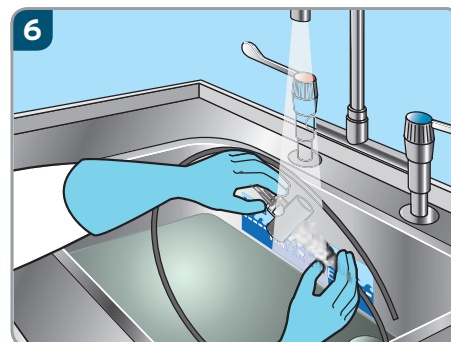

6 Efter förrengöring / desinfektion, Skölj instrumentet med vatten.

Instrumentet kan nu vidarebehandlas efter behov.

## Förrengöring, Rengöring & desinfektion med Sekusept Aktiv

LITER LÖSNING	KONCENTRATION AV LÖSNINGEN	
	1%	2%
2 Liter	30ml	60ml
4 Liter	60ml	120ml
8 Liter	120ml	240ml
10 Liter	150ml	300ml
20 Liter	300ml	600ml
30 Liter	450ml	900ml

100g pulver = 150ml

1 mått = 20g pulver = 30ml

1 dosing cup = 100g powder = 150ml



**ECOLAB AB**  
Glasfibergatan 10  
SE-125 45 Älvsjö  
+46 (0) 8 603 2200  
www.ecolab.se

**ECOLAB**  
**DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany  
+49 (0) 2173 599 0

CE 0297

**ECOLAB®**