

Suma[®] Med Super LpH

Maskindiskmedel för disk- och spoldesinfektorer

Produktbeskrivning

Suma Med Super LpH är en koncentrerad specialprodukt för disk- och spoldesinfektorer. Produktens unika sammansättning gör produkten lågalkalisk samtidigt som den effektivt löser smuts i mjuka och medelhårda vatten.

Produktgenskaper

Suma Med Super LpH är ett lågalkaliskt maskindiskmedel anpassat för disk och spoldesinfektorer. Produkten är speciellt formulerad för instrumentdisk, rondskålar, anesthesiutrustning och bidéskålar.

Kan även användas till kärlkokare och maskindisk. Produkten är mycket skonsam mot diskgoods.

Produktfördelar

- Löser effektivt smuts och intorkat blod
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Skonsam mot diskgodset
- Motverkar kalkbildning i diskmaskinen

Bruksanvisning

Suma Med Super LpH doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 1-3 ml/L. Koppla dunken till doseringsautomatiken/doseringsslangen som sedan automatiskt doserar rätt mängd. Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden. Produkten är avsedd att doseras samtidigt med vattenintag, men kan även doseras senare.

Teknisk information

Utseende:	Klar gul
pH (1% lösning):	10.0
Densitet (20 °C):	1.15

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

För fullständig information om hantering och förvaring hänvisas till säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning. Undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan Suma Med Super LpH användas på dom flesta vanliga förekommande material inom sjukvården.

Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek
2 x 5 L
20 L
200 L

