

FÖRSLAG PÅ BANDAGERING AV DJUR

Förklaring:
Siffrorna 1-4 indikerar vilket bandage som används i illustrationerna.

- 1 THIN FOAM BANDAGE
- 2 THICK FOAM BANDAGE
- 3 ADHESIVE FOAM BANDAGE
- 4 FLEX WRAP BANDAGE



Var försiktig!
Bind inte åt för hårt så att blodcirkulationen begränsas.


ÖRONFÖRBAND

- 2
- 3

1. Forma en bit av Thick Foam Bandage till en kon (för att föra in i örat). Detta är för att skydda hörselgången.



2. Ta en till bit som du formar till en triangel. Placera bakom örat på såret, eller för att ge stöd åt örat vid bandagering.

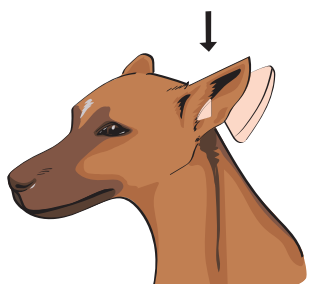

3. Klipp en bit Thick Foam Bandage till en 4,5 cm bred remsa och linda runt örat.




4. Avsluta genom att bandagera örat med Thick Foam Bandage. Håll det på plats med en bredare bit av Adhesive Foam Bandage som fäster på hud och päls. Lämna en öppning för hörselgången och lämna det friska örat obandagerat.




TASSBANDAGE

- 1
- 2
- 4


1. Applicera en längd av Thick eller Thin Foam Bandage mellan tårna och trampdynan. Gör en skåra i bandaget och placera det runt sporen.

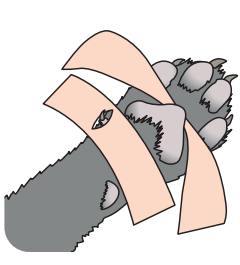


2. Riv av en passande längd av förbandet. Gör skåror för tårna.

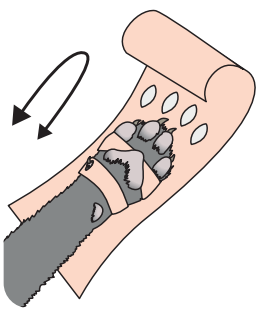


3. För in tårna genom skåror och vik bandaget som bilden visar.

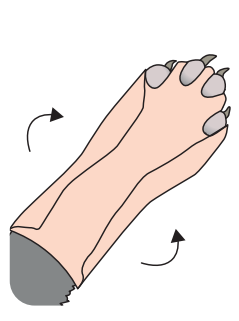

4. Vid behov, linda en extra längd av bandaget runt tassens för att säkra förbandet.

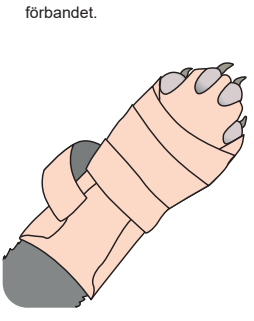


5. Avsluta genom att fixera bandageringen med Flex Wrap Bandage.

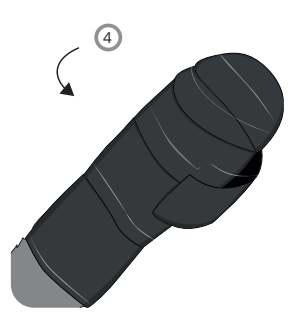


TASSBANDAGE

- 1
- 2


1. Linda en bit av Thick eller Thin Foam Bandage runt benet.

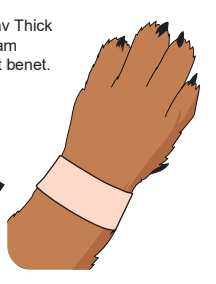


2. Riv av en lämplig längd så att den passar mellan tårna. Fäst till omslaget och vrid 180 grader.

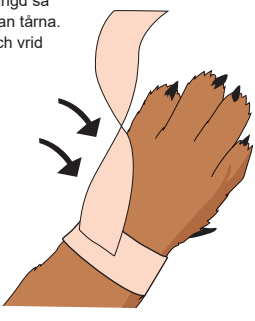

3. Placera den smala delen mellan tårna och fixera bandaget på andra sidan. Repetera för varje tå.

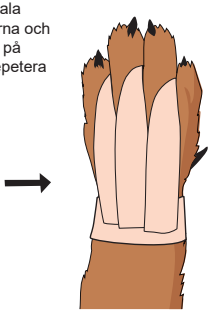


4. Avsluta genom att linda ett andra lager av bandage runt benet för att säkra förbandet.

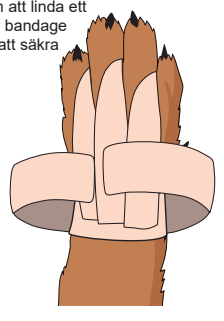

BEHANDLING AV MUGG

Linda en bit Thick Foam Bandage runt benet.

- 2

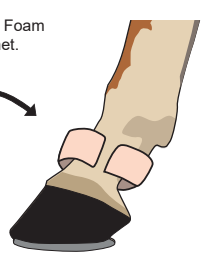

HOVLED

Vid bandagering av hovled, linda en bit Adhesive Foam Bandage från kronleden och neråt. Linda sedan Thick Foam Bandage över det skadade område, fortsatt en bit ned mot hoven.

- 2
- 3



EFTER LEDINJEKTIONER

Behandling efter ledinjektioner bör hanteras av veterinärer.

Bandagering: Placera en bit Thick Foam Bandage över injektionsområdet. Det är viktigt att utnyttja bandagets elasticitet för förhindra att det glider.


- 2



EFTER LEDINJEKTION I KARPUS



Börja med att linda en bit Adhesive Foam Bandage under knät. Linda sedan Thick Foam Bandage över injektionsområdet, överlappa Adhesive Foam Bandage. På detta sätt kommer Thick Foam Bandage inte att glida nedåt. För extra fixering, säkra Thick Foam Bandage med ytterligare ett lager av Adhesive Foam Bandage ovan knät och Thick Foam Bandage.

- 2
- 3

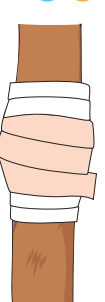


BANDAGERA SÅR


1. Se till att såret är rent och pälsen/benet torr.

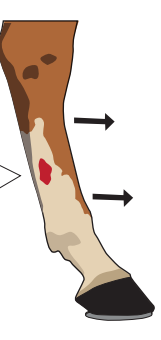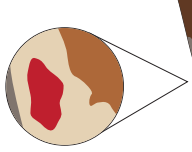


2. Börja med att linda en bit av Adhesive Foam Bandage under det skadade området för fixering.

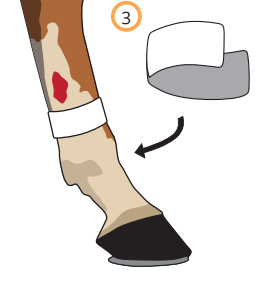


3. Linda sedan Thin eller Thick Foam Bandage över såret i ett spiralliknande mönster. Överlappa det första förbandet med 2-3 cm. Om nödvändigt, applicera en kompress över såret för extra absorbering.

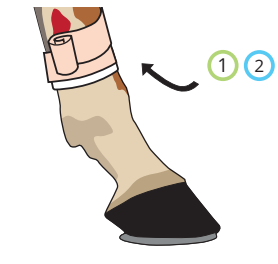

4. Byt ut det översta bandaget vid behov. Det första bandaget kan sitta kvar till såret är läkt.

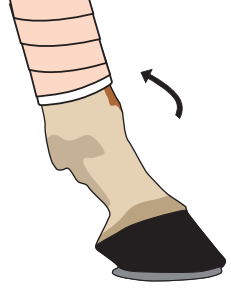


5. Fixera avslutningsvis med ett lager Flex Wrap Bandage.

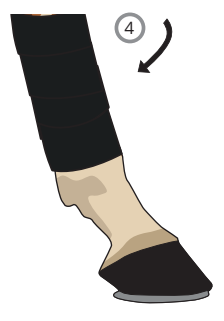


BANDAGERA SÅR

Se till att såret är rent och att pälsen är torr.

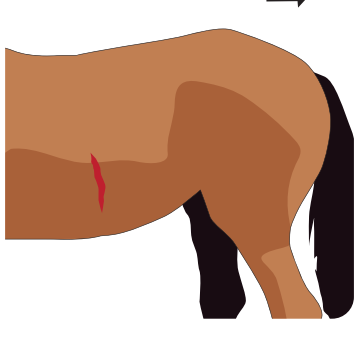


2. Applicera en bit Adhesive Foam Bandage över området som behöver skyddas. Applicera INTE Adhesive Foam Bandage direkt på såret. Använd en kompress för att skydda såret.

- 3

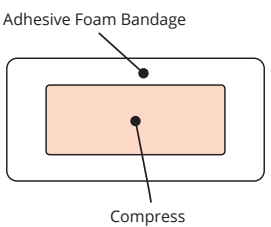


3. Fixera kompressen med Adhesive Foam Bandage.

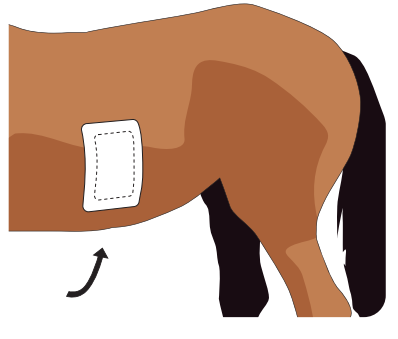

ANDRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Notera hur bandagets elasticitet utnyttjas till hästens hamstrings.


- 2

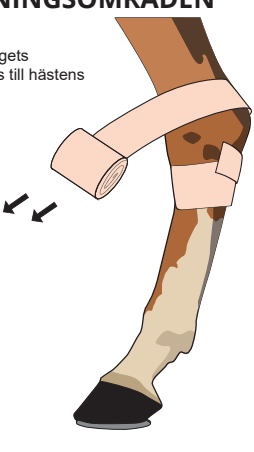

SÅRFRETT OMRÅDE

Applicera Adhesive Foam Bandage direkt på sårfria områden.


- 3

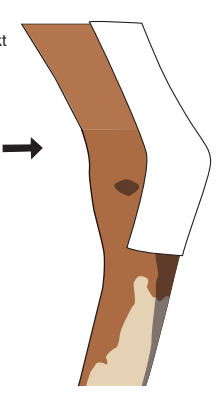

BANDAGERA SPENAR

Använd Thin Foam Bandage vid skada på juver och spenar

- 1

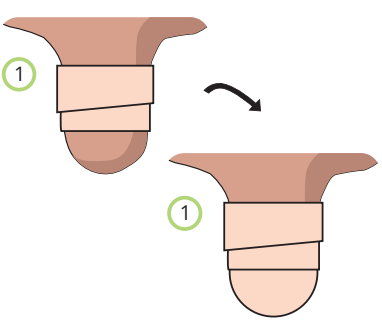

BORTTAGNING AV ADHESIVE FOAM BANDAGE

Använd Snøgg Removal Wipes eller hudvänlig olja för att underlätta borttagning.