



Hydragel

Vaskemiddel til forvask



Forbehandlingsmiddel som forhindrer uttørking og spredning av organisk smuss og sekreter på overflaten av instrumenter.

Bruksområde

Forvaskemiddel i situasjoner der instrumenter ikke blir rengjort umiddelbart etter bruk. Hydragel sprayes direkte på de forurensede instrumentene for å forhindre at organisk materiale tørker inn samt hindre vekst og spredning av mikrober.

Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

Produktegenskaper

Sprayen er enkel å bruke og gel-en danner en mikrobe-tett overflate på instrumentene som forhindrer at smuss og organisk materiale tørker på instrumentene, samtidig som den hindrer spredning og oppvekst av mikrober. Effekten varer i 5 dager. Om nødvendig kan produktet også brukes som vaskeforsterker for instrumenter som er vanskelige å rengjøre. Hydragel er vannløselig og skylles enkelt av. Egnet for de fleste vanlige instrumentmaterialene. Ikke egnet for kobber eller messing.

Bruksanvisning

Bruk en oppbevarings- / transportboks med lokk. Spray Hydragel på instrumentene som ligger i boksen. Følg sikre arbeidsmetoder når du lagrer og transporterer instrumenter. Vask instrumentene som vanlig.

Merk

Unngå kontakt med kjemikalier som kan korrodere eller skade metaller. De kan forbli aktive under geloverflaten. Sprut og flekker kan gjøre gulvet glatt. Rengjør med vann. Les bruks- og sikkerhetsinstruksjonene i sikkerhetsdatabladet.

Innhold

Aktive stoffer

Ikke-ioniske surfaktanter < 5%

Såpe < 5%

Konverseringsmidler

Rustmiddel

pH konsentrat

9.0

Oppbevaring

Lagringstemperatur under 28 ° C. Holdbarhet 3 år fra produksjonsdato.

Produksjonsland

FINLAND

Bruker- og miljø sikkerhet

Produktet er biologisk nedbrytbart. Råvarene er miljøvennlige. Emballasjen er laget av PE-HD-plast som er et miljøvennlig, fullstendig resirkulerbart og brennbart materiale.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhet
/ Artikkel nr.**

Artikkel nr.

GTIN

GTIN (salgsenhet)

6 x 750 ml

8222

6417964082227

6417964482959



Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.