



# KiiltoPro MD Instru Des

## 45+

### Ytdesinfektion



KiiltoPro MD Instru Des IPA 45+ är en medicinteknisk produkt för professionell användning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Produkten består av 45 vol% isopropyl alcohol, tensid (tar bort smuts) samt korrosionsskydd (rostskydd).

KiiltoPro InstruDes 45+ är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C samt Coronavirus.

**Användningsområde** Bruksfärdig IPA-baserad instrumentdesinfektion (45 vol%) för non-invasiv medicinteknisk utrustning och instrumentblötläggning. För invasiva instrument enbart som för-desinfektion innan steriliseringprocessen. Används på ytor som tål alkohol. För professionell användning.

Medicinteknisk produkt, För professionell användning.

**Produktegenskaper** Mikrobiologisk information:  
 EN13727 (baktericidal effekt) - 1 min  
 EN13624 (jästicidal effekt) 2 min  
 EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 1 min  
 EN14476 (Vaccinavirus/höljeförsedda virus) 30 sek  
 EN14348 (Mycobactericidal effect): 5 min

Instrument blötläggning:  
 EN14561 (bactericidal effekt instrument) - 15 min  
 EN14562 (jästicidal effekt instrument) - 15 min  
 EN14563 (tuberculocid effekt instrument) - 15 min  
 EN17111 (höljeförsedda virus effekt instrument) - 15 min

**Bruksanvisning** Används på ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först. Innehåller inte castor oil.

Desinfektion av non-invasiv medicinteknisk utrustning:  
 1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.  
 2. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten samt ovan för kontakttider)  
 3. Lämna ytan att lufttorka

Desinfektion av instrument:  
 1. Skölj av organiskt material från instrumenten i vanligt kranvatten  
 2. Häll upp MD Instru Des 45+ i ett rent kärl  
 3. Lägg ner instrumenten och låt dem ligga i minst 15 min

<b>Obs</b>	Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.
<b>Förvaring</b>	Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
<b>Utseende och doft</b>	Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft
<b>Tillverkningsland</b>	SVERIGE
<b>Användar- och miljösäkerhet</b>	Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Instru Des IPA 45+ skall anmälas till <a href="mailto:info.klc.se@kiilto.com">info.klc.se@kiilto.com</a> samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
3 x 3 l		671-3	7331964006719	7331964906712
12 x 1000 ml		670-12	7331964006702	7331964906705



#### Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).