

GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Universal Detergent

PRODUKTBESKRIVNING

Milt alkaliskt diskmedel för användning i diskdesinfektorer, ultraljudsbad och vid manuell rengöring av medicinsk utrustning. Lämpligt för användning på alkaliresistenta ytor som rostfritt stål, keramik, glas och resistent plast och mjuka metaller.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Dosering 2–10 ml/l.

Rengöringstemperatur (maskin) 35–60 °C.

Rengöringstemperatur (manuell/ultraljud) 30–50 °C.

Använd inte på polykarbonatmaterial.

Kontrollera om materialet är kompatibelt före användning.

Ska sköljas av fullständigt efter användning.

Blanda inte med andra kemikalier.

Neutralisering krävs inte.

INGREDIENSER

Enzymer, avskiljare, korrosionsinhibitorer och komplexbildare.

TEKNISKA DATA

Specifik vikt (20 °C): 1,09 (typisk)

pH vid leverans (typiskt): 10,9

pH vid 5 ml/l i vatten (typiskt): >9,9

Viskositet (koncentrat, 20 °C): < 50 cps

FÖRVARINGSINFORMATION

Förvara på en sval, torr plats som är skyddad mot frost samt på avstånd från syror och starka oxidationsmedel.

Förvara i upprätt läge i originalbehållare.

Optimal förvaringstemperatur är 5–25 °C.

SÄKERHET OCH HANTERING

Läs mer i materialsäkerhetsdatabladet.

CE-MÄRKNING

Universal Detergent uppfyller kraven i EU-direktiv 93/42/EC, bilaga 1 angående medicintekniska produkter.

MILJÖMEDVETENHET

Biologiskt nedbrytbar sammansättning och återvinningsbar förpackning.



Alla produkter



Medel



Getinges utbud av diskmedel har utvecklats, testats och provats på Getinges tvättanordningar för att följa standarden i ISO 15883 för rengöring av medicintekniska produkter.




GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Universal Detergent

VATTNETS HÅRDHET OCH DOSERING AV RENGÖRINGSMEDEL

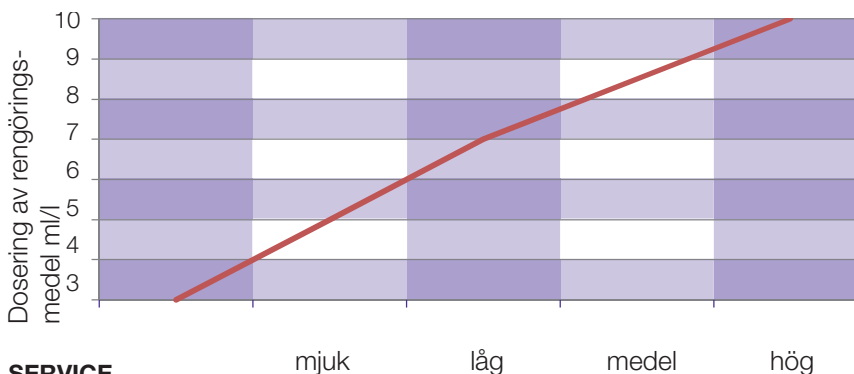

OBS!

Vattnets hårdhet är endast en av flera faktorer som påverkar mängden rengöringsmedel.

Andra faktorer som påverkar är:

- längden på rengöringscykeln
- temperatur
- nedsmutsningstyp, mängd och skick, t.ex. torr
- materialkompatibilitet

SERVICE

Om du vill veta mer om dosering av rengöringsmedel och optimering av rengöringsprocesser kan du kontakta din lokala Getingerepresentant.

GETINGE HANDBOK OCH AUTOMATISK RENGÖRINGSDOS



	Aluminium	Anodiserad aluminium	Titan	lök-järnmetaller	Matt krom	Rostfritt	Glas	Keramik	Gummi	Plast
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M		●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●	●				
■ GETINGE CLEAN PRE TREATMENT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Detta diagram är bara vägledande. Information gällande sterilisation av medicinsk utrustning från tillverkaren i enlighet med ISO 17664 ska alltid följas.

M = Följ alltid instrumenttillverkarens anvisningar.

ORDERNUMMER

5 l	10 l	25 l	205 l
503435002	503435102	503435202	503435302

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11
 Box 1505, 351 15 Växjö
 Telefon: +46 (0)10 335 98 00
 Webbplats: <http://www.getinge.com>
 E-post: info@getinge.com