



KiiLTO

Ytdesinfektionsmedel / färdig att använda

Descosept Sensitive Wipes

Servetter för alkoholbaserad ytdesinfektion

- Bra material- och hudkompatibilitet **med låg etanolhalt.**
- Brett användningsområde **på ytor och medicintekniska produkter.**
- Effektiv desinfektion och rengöring **med lång livslängd och brett verksamhetsspektrum.**
- Säker att använda utan handskar.
- **Observera!** Följ alltid din hygienenhets instruktioner angående användning av handskar.
- Vävnad utan väv (nonwoven) tillverkad av förnybara resurser.



DESOTEX®
Wipes
System



DESOTEX®
BIO



HACCP

DERMATEST



Dr.
Schumacher

YTOR / FÄRDIGT ATT ANVÄNDA DESINFEKTIONSMEDEL

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

PRODUKTBESKRIVNING

Varierande uppgifter **kräver mångsidiga produktlösningar**



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES är alkoholbaserade, färdiga att använda servetter för desinfektion och rengöring av medicinska tekniska produkter och medicinsk utrustning samt alla typer av ytor, särskilt känsliga ytor nära patienten. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES har en patenterad vikningsteknik med en optimal balans mellan nonwoven-fleece och impregneringslösning. Detta säkerställer snabb och effektiv desinfektion samtidigt som känsliga ytor och material skonas.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES är den hållbara lösningen tillverkad av 100 % biologiskt nedbrytbar nonwoven. Nonwoven-tyget, gjort av förnybara råmaterial, ger bättre absorption och effektivare rengöring. Den förbättrade nonwoven-tyget möjliggör optimal fördelning av impregneringslösningen, tillräcklig för en yta på över 2 m² per våtservett.

Nedbrytbarheten hos våra nonwoven-tyger är certifierad enligt den europeiska standarden EN 13432. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES är effektiva mot bakterier, jästsvampar (inklusive Candida auris) och höljevirus. Även lämplig för återanvändning av desinfektions-dispenserar i anodiserad aluminium.

YTOR / FÄRDIGT ATT ANVÄNDA DESINFEKTIONSMEDEL

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN OCH ANMÄRKNINGAR

TILLÄMPNINGSSOMRÅDE

Enligt förordningen om biocidprodukter (BPR) Snabb desinfektion och rengöring av alkoholresistent medicinsk utrustning och alla typer av ytor, främst i patientnära områden. Lämplig för användning inom livsmedelssektorn. **Avsedd användning enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter**

För desinfektion och rengöring av ytor på icke- invasiva medicintekniska produkter med mekanisk verkan för professionella användare.

Ytterligare användningsområden Förutom inom vårdsektorn är den även lämplig för livsmedelssektorn och stora storkök samt för industri och offentliga anläggningar.

ANVÄNDNING

Torka ytor med DESCOCEPT SENSITIVE WIPES tills de är helt fuktiga och håll dem fuktiga under hela kontakttiden. Synlig smuts måste avlägsnas innan desinfektion.

Enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter är användare/patienter skyldiga att rapportera alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren/patienten är etablerad.

Användningsanmärkningar

Hållbarhet efter öppnande: 42 dagar

Sammansättning

100 g lösning innehåller: 45 g etanol.

Materialkompatibilitet

Brett användningsområde på ytor och medicintekniska produkter. (se sidorna 5–8)

Produktstatus

Dual Registration (medical device/biocide)

Försiktighets- och riskuttryck

Brandfarlig vätska och ånga. Vid behov av medicinsk rådgivning, ha produktens behållare eller etikett till hands. Förvaras oåtkomligt för barn. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rök inte. Behållaren ska hållas tätt tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja. Kassera innehåll/behållare till godkänt avfallshanteringsföretag eller lokal insamlingsplats. Endast för professionellt bruk av personal med motsvarande specialistkunskap enligt nationella riktlinjer.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt.

Läs alltid etikett och produktinformation före användning.





YTDESINFEKTIONSMEDEL / FÄRDIGA ATT ANVÄNDA

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

EFFEKTOMRÅDE OCH KONTAKTTIDER

VERKNINGSSPEKTRUM OCH KONTAKTTIDER			30 s	1 min	2min	3 min
Rekommendationer för användning av ytdesinfektion						
Bakteriedödande 1, jästsvampdödan-de 1	VAH 2 / EN 3	Med mekanisk påverkan, smutsiga förhållanden			•	
Tuberkulocid	EN 14348	Rena och smutsiga förhållanden		•		
Mykobakter-iedö-dande	EN 14348	Rena och smutsiga förhållanden			•	
Begränsat spek-trum virucid	EN 14476	Rena förhållanden			•	
	EN 14476	Smutsiga förhållanden				•
Verksam mot omslutna virus	EN 14476	Rena och smutsiga förhållanden		•		
additional results						
Bakteriedödande	EN 16615	Med mekanisk påverkan, smutsiga förhållanden			•	
	EN 13727	Smutsiga förhållanden		•		
	EN 1276	Smutsiga förhållanden	•			
Jästsvampdödande	EN 16615	Med mekanisk påverkan, smutsiga förhållanden			•	
	EN 13624	Smutsiga förhållanden		•		
	EN 1650	Smutsiga förhållanden	•			
Verksam mot ade-novirus	EN 14476	Rena förhållanden			•	
	EN 14476	Smutsiga förhållanden				•
Verksam mot noro-virus (MNV)	EN 14476	Rena och smutsiga förhållanden	•			
Verksam mot vac-ciniavirus	EN 14476	Rena och smutsiga förhållanden		•		

1 –inklusive fas 2 steg 1 och fas 2 steg 2 tester (kvantitativa suspensionstester och kvantitativa bärartester) 2 – VAH-listad 5 minuter

3 – EN 13624, EN 13727, EN 16615

YTDESINFEKTIONSMEDEL / FÄRDIGA ATT ANVÄNDA

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

MATERIALKOMPATIBILITET

MATERIAL METALLER	Ej rekommenderat	Begränsatre-kommanderat	Rekommenderat	ANVÄNDNING PRODUKTEXEMPEL
Rostfritt stål V2A			•	Medicinska transportstolar
			•	Toalettstolar
			•	Rullande gånghjälpmedel
			•	Gånggramar
Anodized aluminium			•	Desinfektionsmedelsdispensrar
Brass	•			Luer lock-adapter
	•			Stetoskop (krompläterad mässing)
Aluminium	•			

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

MATERIALKOMPATIBILITET

MATERIAL PLASTER: ELASTOMERER	Ej rekommenderat	Begränsat-rekommenderat	Rekommenderat	ANVÄNDNING PRODUKTEXEMPEL
CR (kloropren gummi)				
PUR (polyuretan)				Medicinska transportstolar
EPDM (eten-propen-diengummi)				Sjukvårdsvagnar
Silikoner				Andningsskydd / Respiratorer
				Medicinska tangentbord och möss

MATERIALKOMPATIBILITET

MATERIAL PLASTER: TERMOPLASTER	Ej rekommenderat	Begränsat-rekommenderat	Rekommenderat	ANVÄNDNING PRODUKTEXEMPEL
PC (polykarbonat, t.ex. Makrolon)				Ultraljudsapparater
				EKG-apparater
				EEG-apparater
				MR-apparater
				CT-apparater
				Bukultraljudssonder
				Perfusorer
				kirurgihöljeskomponenter
ABS (akrylonitril-butadien-styren)				- Patientövervakningsmonitorer - Medicinska tangentbord och möss
PE-HD (högdensitetspolyeten)				Förvarings- och transportbehållare
PE-LD (lågdensitetspolyeten)				
PSU (polysulfon)				Höljeskomponenter
PP (polypropen / polypropylen)				
PUR (polyuretan)				
PA (polyamid)				Röntgenkanal
PMMA (polymetylmetakrylat)				Akryl och Plexiglas, inkubatorer

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

MATERIALKOMPATIBILITET

MATERIAL TEXTILIER	Ej rekommenderat	Begränsat-rekommenderat	Rekommenderat	ANVÄNDNING PRODUKTEXEMPEL
Konstläder (t.ex. med PVC- och PUR-tytlager)				- Undersöknings- och behandlingsbriter - Positionshjälpmedel
				Gynekologisk undersökningsstol
				Tandläkarstolar
				- Operationsbord - Patienttransportbriter
PVC (polyvinylklorid)				Golvbeläggningar

INKÖPSINFORMATION

Produkt	Leveransenh	Innehåll	Storlek	REF
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	6	100 Wipes	20 x 20 cm	81110



CERTIFIERINGAR



För en översikt över de aktuella certifieringarna, skanna QR-koden för att besöka:
<https://www.schumacher-online.com/en/cert>

Dr. Schumacher är certifierat enligt DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, har ett validerat miljöledningssystem enligt EMAS och är medlem i IHO, VCI, BAH, DGSV och DGKH.



Tillverkare

**Dr.
Schumacher**

Dr.Schumacher GmbH | Am Roggenfeld 3, 34323
Malsfeld, Germany
Tel +49 (0)5664 9496 0 info@
schumacher-online.com

Distributör



KiiltoClean AB | Bjäre plats 13, 7 tr
218 45 Vintrie | Tel +46 (0)70-655 57 54 |
www.kiilto.se