

## Venpunktion med mikronål

Använd stasband vid blodprovtagning i arm. Förbered punktionsstället med ett lämpligt desinfektionsmedel. Vidrör inte venpunktionsstället efter desinfektionen. Placera patienten så att det är enkelt att nå venen.

- 1 Blisterförpackningen öppnas aseptiskt med tumme med pekfinger och peel-off-teknik. Den transparenta folien måste vara riktad uppåt.
- 2 Drag av skyddslocket från mikronålen.
- 3 Efter att desinfektionsmedlet har torkat, ta ut mikronålen ur skyddshylsan och säkerställ att den slipade sidan på mikronålen är riktad uppåt.
- 4 Punktera venen med mikronål genom att hålla denna i ett grepp mellan tumme och pekfinger. Håll mikronålen så att dess bakre ände ligger under punktionsstället. Låt blodprovet droppa ned i provbehållaren. Om blodflödet avstannar, kan mikronål på säkert sätt vridas i upp till 360° med greppfattningen.
- 5 Efter avslutad blodprovstagningen dras mikronålen ut ur venen och kastas direkt i en avfallsbehållare för stickande/skärande föremål.

