



PICO[◇] 7


Snabbguide

smith-nephew.com/pico

 **smith&nephew**

PICO[◇] 7

Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System

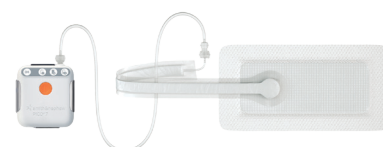

Supporting healthcare professionals

PICO[◇] 7

Innovativ teknik



Det bästa PICO-systemet vi någonsin gjort

Pumpprestanda

PICO-pumpen är mer än dubbelt så effektiv på att hantera luftläckage än sin föregångare.¹ Den förbättrade effektiviteten kan vara till hjälp vid behandling med negativt tryck på problematiska områden där det är svårt att få tätt.

Användarvänlighet

- Ny ikon som indikerar när förbandet är fullt, vilket optimerar förbandsbyten.
- Område för att skriva startdatum för behandling, vilket underlättar följsamhet till vårdprotokoll.

Flexibilitet

Nu finns flerpäck med 5 förband tillgängligt så att behandlingen kan anpassas efter patientens kliniska behov.

Livskvalitet för patienten

- Nu ännu tystare.²
- Ny bältesklämma för bättre bärbarhet.³

Status och felsökning

varningar och fel

Displaystatus	Indikatorstatus	Möjlig orsak	Kommentarer/felsökning
	Alla indikatorer av	Pumpen är i standbyläge	Sårbehandling med negativt tryck (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) har pausats. Tryck på den orange knappen för att starta om NPWT.
		Pumpen har slutfört NPWT	Vid tryck på den orange knappen startas inte NPWT om. Applicera ny pump och nytt förband om ytterligare NPWT krävs.
		Batterierna är uttömda	Byt ut batterierna om pumpen ännu inte har slutfört NPWT.
	Den gröna OK-indikatorn blinkar	Systemet fungerar som det ska. Inga problem.	Pumpen kan ibland höras då den bibehåller det negativa trycket. Detta är normalt.
	Den gröna OK-indikatorn och den orange indikatorn för luftläckage blinkar	Pumpen arbetar för att uppnå NPWT men har inte nått det avsedda trycket.	Vänta upp till 65 sekunder. Bedöm om NPWT har etablerats.
	Den gröna OK-indikatorn och den orange indikatorn för svagt batteri blinkar	Systemet fungerar korrekt men batterierna är svaga	Byt ut batterierna och tryck på den orange knappen för att åter starta behandlingen.
	Den orange indikatorn för luftläckage blinkar	Ett större luftläckage har upptäckts. NPWT appliceras inte. (Obs: pumpen kommer automatiskt att försöka starta NPWT efter 1 timme)	Jämna till förbandet och fixeringsremsorna för att ta bort eventuella veck. Tryck på den orange knappen för att starta om NPWT. Den orange läckageindikatorn börjar blinka efter ungefär 60 sekunder om luftläckaget kvarstår. Se till att snabbkopplingarna har skruvats ihop ordentligt.
	Den orange indikatorn för luftläckage och den orange indikatorn för svagt batteri blinkar	Ett större luftläckage har upptäckts och batterierna är svaga. NPWT appliceras inte. (Obs: pumpen kommer automatiskt att försöka starta NPWT efter 1 timme)	Åtgärda luftläckaget enligt anvisningarna ovan. Byt även ut batterierna och tryck på den orange knappen för att åter starta behandlingen.
	Den orange indikatorn för fullt förband blinkar	Förbandet är fullt eller så är filtret igensatt. NPWT appliceras inte. (Obs: pumpen kommer automatiskt att försöka starta NPWT efter 1 timme)	Vårdpersonal ska byta ut förbandet och trycka på den orange knappen för att åter starta NPWT.
	De orange indikatorerna för fullt förband och för svagt batteri blinkar	Förbandet är fullt eller så är filtret igensatt och batterierna är svaga. NPWT appliceras inte. (Obs: pumpen kommer automatiskt att försöka starta NPWT efter 1 timme)	Vårdpersonal ska byta ut förbandet. Byt även ut batterierna och tryck på den orange knappen för att åter starta behandlingen.
	Alla indikatorer lyser med ett fast sken	Ett pumpfel har upptäckts. Pumpen kan inte längre applicera NPWT.	Vårdpersonal ska applicera en ny pump och ett nytt förband.

Applikationsguide



1. Rengör och förbered såret enligt lokala riktlinjer.

Lägg om





2. Avlägsna den mittersta fliken av skyddsfilm och placera förbandet centralt över såret. Porten ska vara vänd uppåt och utanför sårområdet.
3. Avlägsna de andra två flikarna och släta ut förbandet runt om såret för att förhindra veckbildning.

Tryck


4. Sätt i batterierna i pumpen.
5. Koppla samman förbandet med pumpen genom att skruva ihop slangkopplingarna.
6. Tryck på den orange knappen för att påbörja appliceringen av negativt tryck. Den gröna lampan börjar blinka (indikerar att systemet fungerar som det ska).

Starta


7. Placera fixeringsremarna över förbandets fyra sidor.
8. Pumpen har en livslängd på 7 dagar och förbandet kan sitta kvar i upp till 7 dagar beroende på mängden exsudat.
9. När sårfillnadsmaterial används ska fyllnads materialet och PICO-förbandet bytas 2 till 3 gånger i veckan.

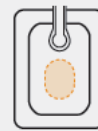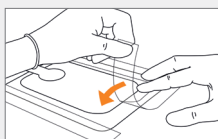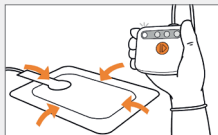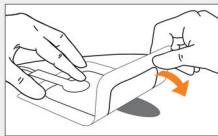

A Förbandet är rätt placerat och det är acceptabelt att låta det sitta kvar

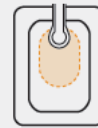

B Förbandsbyte krävs – porten kan blockeras av vätska

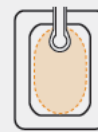

C Förbandsbyte krävs – det absorberande området är fullt

Beställningsinformation

Förband	Storlek på förband	2 x förband*	1 x förband**	Flerpack***
	10 cm x 20 cm	66802002	66802012	66802022
	10 cm x 30 cm	66802003	66802013	66802023
	10 cm x 40 cm	66802004	66802014	66802024
	15 cm x 15 cm	66802005	66802015	66802025
	15 cm x 20 cm	66802006	66802016	66802026
	15 cm x 30 cm	66802007	66802017	66802027
	20 cm x 20 cm	66802008	66802018	66802028
	25 cm x 25 cm	66802009	66802019	66802029
	Multisite litet, 15 cm x 20 cm	66802000	66802010	66802020
	Multisite stort, 20 cm x 25 cm	66802001	66802011	66802021

Förbrukningsartiklar		Produktkod		
	Skum	10 cm x 12,5 cm	66801021	
	Gas	11 cm x 4 m	66802127	

* 2 x förband = 2 förband + 1 pump, ** 1 x förband = 1 förband + 1 pump, *** Flerpack = endast 5 förband

Wound Management
Smith & Nephew AB
Kråketorpsgatan 20
431 22 Mölndal

www.smith-nephew.com

T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31

©Varumärke från Smith & Nephew
TM Alla varumärken är godkända
© Smith & Nephew oktober 2017
18-02946-SV

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Före användning av produkten, läs alltid bruksanvisningen med detaljerad produktinformation såsom indikation för användning, kontraindikationer, effekter, försiktighetsåtgärder, varningar och viktig säkerhetsinformation.

Referenser

1. Data on File. DS.16.352.R Measurement of NPWT device air leak tolerance – PICO® vs PICO II. September 2016; 2. Data on File. DS.16.351.R Comparison of noise levels generated by the PICO and PICO II devices in operation. September 2016; 3. WMP.11446.UF/R3 Project Fairbanks Human Factors Summary Report Issue 5. G Walker, May 2017.