



AKTIV RENGÖRING OCH EFFEKTIV DESINFEKTION

Sekusept™ aktiv

PERÄTTIKSYRABASERAD DESINFEKTION MED UTMÄRKT RESULTAT

Sekusept Aktiv kombinerar aktiv rengöring med effektiv desinfektion och utmärkt materialkompatibilitet i en och samma produkt. Därmed erbjuds bästa funktion för såväl användaren som instrument.

Övriga egenskaper:

- Snabb virucidal effekt - slutdesinfektion
- Avlägsnar effektivt proteinrester
- Ingen fixeringseffekt



Sekusept™ aktiv

Perättiksyrabaserad desinfektion med utmärkt resultat

RENGÖRING

Sekusept Aktiv utvecklades i syfte att uppnå bästa möjliga rengöringsresultat. Dess utmärkta prestanda bevisades av externa, oberoende institut.

DESINFEKTION

Den innovativa formuleringen baserat på aktivt syre och perättiksyra skapar en aktiv substans som är effektivt mot bakterier, mykobakterier, svampar, virus och bakteriesporer. Resultatet är hög effektivitet med mycket kort exponeringstid.

SÄKERT




Med hög rengöringsförmåga och bred mikrobiologisk effekt, kan Sekusept Aktiv användas för all manuell slutdesinfektion. Produkten har hög materialkompatibilitet för att stödja en lång hållbarhet av ditt instrument.


PEROXYBALANS KONCEPT

År av utveckling har optimerat pH-värdet inom det neutrala området, vilket säkerställer att PerOxyBalance®-desinfektionsmedlet är säkert för patient, personal och själva instrumentet.

Inte lämpligt för instrument av mässing och koppar samt för mekaniskt skadade, förkromade och förnicklade instrument.

DOSERING

LITER BRUKSLÖSNING	KONCENTRATION AV BRUKSLÖSNING
	2% ml
2 liter	60 ml = 2 x 
4 liter	120 ml = 4 x 
8 liter	240 ml = 8 x 

 1 dosmätt = 20g pulver=30ml

MIKROBIOLOGISK EFFEKT

KRAV/VILLKOR	KONCENTRATION	KONTAKTTID MIN.
Desinfektion av instrument i enlighet med VAH (baktericidal och jästicidal) Rena & smutsiga förhållanden	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Baktericidal I enlighet med EN 13727 och EN 14561, orena förhållanden	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Jästicidal I enlighet med EN 13624 och EN 14562, orena förhållanden	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Fungicidal I enlighet med EN 13624 och EN 14562, orena förhållanden	4,0% 3,0%	15 min 30 min
Mykobaktericidal I enlighet med EN 14348 och EN 14563, orena förhållanden	2,0% 1,0%	15 min 60 min
Tuberkulocidal I enlighet med EN 14348 och EN 14563, orena förhållanden	2,0% 1,0%	15 min 60 min
Virucidal I enlighet med EN 14476 och EN 17111, orena förhållanden	2,0% 1,0%	15 min 30 min
Sporicidal. I enlighet med EN 17126, orena förhållanden	2,0%	15 min
Clostridium difficile. I enlighet med EN 17126, orena förhållanden	1,0%	15 min

BESTÄLLNINGSPÅGÅENHET

PRODUKT	FÖRPACKNINGSENHET	ARTIKELNUMMER
Sekusept Aktiv spann med dosmätt	4 x 1,5 kg	3050510
Sekusept aktiv test strips	4 rör à 50 strips	3007370

ECOLAB AB

Glasfibergratan 10
Box 164, SE-125 24 Älvsjö
+46 (0)8 603 22 00
www.ecolab.se



CE
0297

Levererad Av:

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För manuell rengöring och desinfektion samt slutdesinfektion av medicintekniska produkter. Särskilt lämpligt för termolabil utrustning som inte kan autoklaveras, t.ex. flexibla endoskop och bedövningsutrustning.

BRUKSANVISNING

För beredning av brukslösning, använd följande dosmätt. Tillsätt den rekommenderade pulvermängden i vattnet under omrörning och upprepa omrörningen flera gånger under 15 minuter. Sänk ner instrumentet så att alla ytor är helt täckta.

Rengör föremålet enligt instrumenttillverkarens instruktioner, inklusive mekanisk bearbetning (t.ex.: borsta, torka) tills det är rent. Ta bort instrumentet efter rekommenderad kontakttid och skölj med rent vatten. Torka yttre ytor och inre kanaler (t.ex. av endoskop) efteråt. För slutdesinfektion krävs ett bad för rengöring och ett bad för desinfektion.

Lösningen måste beredas varje arbetsdag. Vid synlig förorening förbered omedelbart en ny lösning.

LÄTT FÄRGVARIATION AV PULVRET KAN FÖREKOMMA, DETTA HAR DOCK INGEN PÅVERKAN PÅ PRODUKTENS PRESTANDA.

INNEHÅLL

Natriumperkarbonat, nonjoniska tensider, fosfonater. Aktivt innehåll av 2% lösning: > 1000 ppm perättiksyra.

FÖRVARING

Farligt. Respektera försiktighetsåtgärderna för användning (utarbetade enligt europeiska gällande regler för klassificering och märkning av kemiska produkter). Förvaring: mellan +5 °C och +25 °C.

CERTIFIKAT

Medicinsk utrustning. Full antimikrobiell aktivitet för Sekusept Aktiv ingår i den vetenskapliga dokumentationen, tillgänglig på begäran.

MEDICINSK UTRUSTNING SKA ANVÄNDAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vänligen läs ettikett- och produktinformation.



ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

ECOLAB®

www.ecolab.se