

GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Neutralizer

PRODUKTBESKRIVNING

En mild organisk syra för användning i diskdesinfektorer för neutralisering av alkaliska rengöringsmedel och avlägsnande av kalk i hårt vatten och andra mineraler som är upplösliga med syra på medicinska instrument. Neutraliseraren tar effektivt bort pH ur sköljvattnet efter alkaliseringen. Lämpligt för alla syraresistenta ytor som rostfritt stål, keramik, glas och plast.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Neutralisering: dosering 1–2 ml/l. Temperatur: 40–60 °C

Rengöring: dosering 1–5 ml/l vid temperaturer > 50 °C.

Använd inte på polykarbonatmaterial.

Säkerställ att alla material som exponeras för processen är syraresistenta.

Ska sköljas av fullständigt efter användning.

Blanda inte med andra kemikalier.

INGREDIENSER

Citronsyra

TEKNISKA DATA

Specifik vikt (20 °C): 1,1 (typiskt)

pH vid leverans (typiskt): 1,2

pH vid 5 ml/l i vatten (typiskt): 2,2

Viskositet (koncentrat, 20 °C): < 50 cps

FÖRVARINGSINFORMATION

Förvara på en sval, torr plats som är skyddad mot frost och på avstånd från alkalier och starka oxidationsmedel.

Förvara i upprätt läge i originalbehållare.

Optimal förvaringstemperatur är 5–25 °C.

SÄKERHET OCH HANTERING

Läs mer i materialsäkerhetsdatabladet.

CE-MÄRKNING

Produkten uppfyller kraven i EU-direktiv 93/42/EC, bilaga 1 angående medicintekniska produkter.

MILJÖMEDVETENHET

Biologiskt nedbrytbar sammansättning och återvinningsbar förpackning.



Instrument



Neutralizer



Getinges utbud av diskmedel har utvecklats, testats och provats på Getinges tvättanordningar för att följa standarden i ISO 15883 för rengöring av medicintekniska produkter.



GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Neutralizer

SERVICE

Kontakta din Getingerepresentant om du vill veta mer om dosering av rengöringsmedel och optimering av rengöringsprocesser.

GETINGE HANDBOK OCH AUTOMATISK RENGÖRINGSDOS



	Aluminium	Anodiserad aluminium	Titan	Icke-järnmetaller	Matt krom	Rostfritt	Glas	Keramik	Gummi	Plast
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M		●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●	●				
■ GETINGE CLEAN PRE TREATMENT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Detta diagram är bara vägledande. Information gällande sterilisation av medicinsk utrustning från tillverkaren i enlighet med ISO 17664 ska alltid följas.
M=Följ alltid instrumenttillverkarens anvisningar.

ORDERNUMMER

5 l	10 l	25 l	205 l
503435802	503435902	503436002	503436102

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11,
Box 1505, SE-351 15 Växjö, Sweden
Telefon: +46 (0)10 335 98 00
Web: <http://www.getinge.com>
E-mail: info.disinfection@getinge.com