

Carbon Tech värmedyna kan användas till djur under sedering eller narkos och total tillsyn. Den ska användas i plant läge, veck på dynan kan ge punktvis högre temperatur.

Det är av största vikt att all personal som handhar värmedynan är informerad om hur den ska användas och är medvetna om riskerna.

VARNING: Värmeackumulering

- Värmedynans konstruktion gör att temperaturen inte kommer upp i nivåer där dynan i sig kan orsaka brännskador.
- Djuret ska placeras direkt på värmedynan utan mellanliggande material.
- Undvik att djuret under lång tid ligger i samma position, detta kan leda till vävnadsnekros.
- Fukt eller vätskor mellan djur och värmedyna kan skapa ökad värme som i sin tur kan leda till vävnadsnekros. Sörj för att hålla kontaktytan mellan djur och dyna torr.
- Det är viktigt att kontrollera djurets kroppstemperatur, detta för att undvika hypertermi.
- Iaktta extra vaksamhet med djur som har övervikt, hög ålder eller systemisk sjukdom.
- Diatermiplattor ska isoleras från dynan på ett adekvat sätt.
- Lämna aldrig ett vaket djur utan tillsyn med en värmedyna.
- Var extra vaksam på djurets temperatur om det är övertäckt.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderar på att byta till alternativet Bair-Hugger med cirkulerande varmluft.

Kontakta kundtjänst på 0771-215500 eller kundtjanst@swevet.se