



HYDROCYN aqua Solution

HYDROCYN aqua Solution används för att rengöra och/eller spola alla typer av sår och finns även som spray. Lösningen tar effektivt bort bakterier, virus och svamp och motverkar dålig lukt från såret. HYDROCYN aqua Solution löser även upp infekterad vävnad och främjar den naturliga läkningen.

Produktnr. HYDROCYN aqua	Typ	Volym	Förp. strl.
Solution			
HW3CE700	Spray mist	100ml	50
HW34E100	Cap closure	250ml	24
HW34E700	Spray mist	250ml	24
HW35D100	Cap closure	500ml	12



HYDROCYN aqua Gel Spray och Gel

HYDROCYN aqua Gel Spray och Gel har en lindrande effekt och används för att hålla såret fuktigt och för att förhindra tillväxt av nya bakterier. Genom att skapa en fuktig sårbädd hjälper HYDROCYN aqua Gel Spray och Gel till att bryta ner infekterad vävnad och påskynda läkningen.

Produktnr. HYDROCYN aqua	Typ	Volym	Förp. strl.
Gel			
HW40F900	Gel tub	15 g	20
HW42C900	Gel tub	50 g	12
HW4CB900	Gel tub	100 g	6
Gel Spray			
HW42E800	Gel Spray (BOV)	50 g	50
HW4CG800	Gel Spray (BOV)	100 g	42

HYDROCYN[®] *aqua*



HYDROCYN aqua – rengör sår från bakterier och påskyndar den naturliga läkningen utan sveda eller irritation

Skapar en ren sårbädd

- Dödar bakterier, virus och svamp
- Motverkar dålig lukt från såret

Stödjer den naturliga läkningen

- Lindrar och skapar en fuktig sårmiljö för att påskynda läkningsprocessen

Tar till vara på kraften från kroppens egna försvar

- Innehåller hypoklorsyra, ett ämne kroppens egna celler använder för att bekämpa infektioner.

Enkel att använda

- Färdig att användas, ingen spädning krävs
- Kan kombineras med andra former av sårbehandling

Säker

- **Svider eller irriterar ej**
- **pH-neutral och allergivänlig**
- Fri från konserveringsmedel, parabener, antibiotika och steroider
- Bevisat säker och effektiv

Bactiguard[®] Bactiguard AB | +46 8 440 58 80 | info@bactiguard.com | www.bactiguard.com



I alla väder.

Bactiguard



Effektiv och skonsam
sårvård för din häst

HYDROCYN[®] *aqua*



HYDROCYN aqua – effektiv och skonsam sårvård för din häst

Låt inte ett sår, bett eller infekterad hud sätta stopp för era planer. Med HYDROCYN aqua kan du enkelt rengöra större eller mindre problem-områden från bakterier och påskynda den naturliga läkningen utan sveda eller irritation. HYDROCYN aqua är även effektiv mot virus, mugg och olika svampangrepp, som till exempel ringorm.

Vad är HYDROCYN aqua?

HYDROCYN aqua är en effektiv och skonsam sårvårdsprodukt för hästar och andra djur och finns som lösning, spray och gel.

HYDROCYN aqua är effektiv mot bakterier, virus och svamp utan att irritera huden. Innehållet av hypoklorsyra (HOCl) främjar den naturliga läkningen, verkar antiinflammatoriskt och motverkar dålig lukt från såret. HYDROCYN aqua innehåller inga tillsatser eller konserveringsmedel och luktar eller svider inte.

Samtliga produkter är säkra att använda runt känsliga områden som ögon, öron, mun och nos, och utgör ingen fara om djuret slickar såret.

Användningsområden

- Kirurgiska sår
- Skärsår och rivsår
- Bitsår
- Skavsår
- Brännskador
- Infekterad hud och hudveck
- Rengöring av ögon, öron, nos och mule
- Hud och ögonirritationer
- Svamp, ringorm
- Mugg



Så här använder du HYDROCYN aqua

1

Steg 1: Skölj

Vid behov avlägsna päls runt såret. Rengör såret genom att applicera rikligt med HYDROCYN aqua på det drabbade området.



2

Steg 2: Blötlägg


Dränk in ett omslag med HYDROCYN aqua Solution och låt verka i 10 min beroende på sårtyp.



3

Steg 3: Rengör


Rengör såret med HYDROCYN aqua Solution

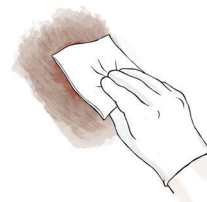

4

Steg 4: Applicera HYDROCYN aqua Gel Spray eller HYDROCYN aqua Gel

Applicera HYDROCYN aqua Spray eller HYDROCYN aqua Gel jämnt över det drabbade området. (Håll sprayflaskan på cirka 10–15 cm avstånd för en jämnare applicering.)

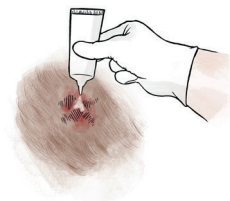

5

Steg 5: Lägg på förband

Täck med lämpligt förband. Applicera HYDROCYN aqua Gel Spray eller HYDROCYN aqua Gel mellan förbandsbytena för att hålla såret fuktigt.

