

# Bovidiar

Sneltest kalverdiarree

ARTIKELNUMMER 1006

## GEBRUIKSAANWIJZING



1. Pak een mestmonster rechtstreeks van de anus van het kalf. Pak een lepeltje vol indien de mest vloeibaar is.



2. Als de mest stevig is, verwijder het overschot dan met de houten spatel.



3. De inhoud moet glad zijn met de bovenkant van het lepeltje.



4. Plaats het lepeltje in het testbuisje.

# Bovidiar


Sneltest kalverdiarree

ARTIKELNUMMER 1006

## GEBRUIKSAANWIJZING




5. Schud het testbuisje stevig zodat de mest goed oplost in de bufferoplossing.

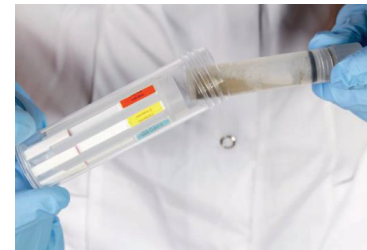

6. Plaats het testbuisje in het monsterflesje.



7. Draai het monsterflesje stevig dicht totdat je twee keer een klik voelt. Laat het flesje 10 minuten rechtop staan. De vloeistof zal langs de teststrips omhoog lopen. Als na 10 minuten 1 lijn zichtbaar is, dan is de test negatief. Als beide lijnen zichtbaar zijn, is de test positief.

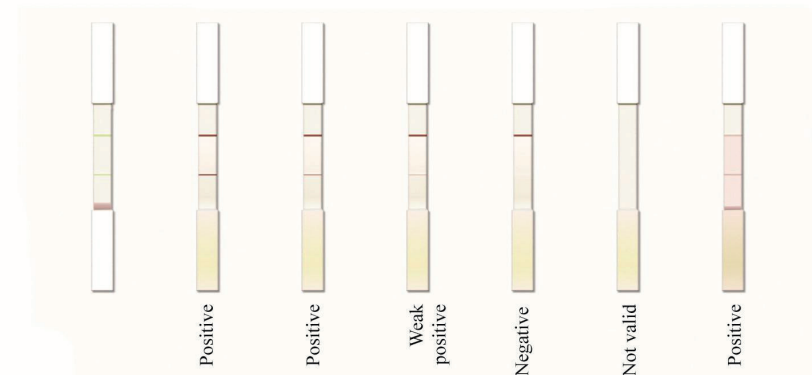

# Bovidiar

Rapid test calf diarrhea

ARTICLENUMBER 1006

## INSTRUCTION MANUAL



1. Take a sample directly from the anus of the calve. Get a full spoon if the diarrhea is very thin.



2. Thicker diarrhea → remove surplus with wooden spatula.



3. Content should evenly fill the spoon.



4. Place the spoon in the test tube.

# Bovidiar


Rapid test calf diarrhea

ARTICLENUMBER 1006

## INSTRUCTION MANUAL



5. Shake the test tube firmly to mix the diarrhea with the buffer solution.

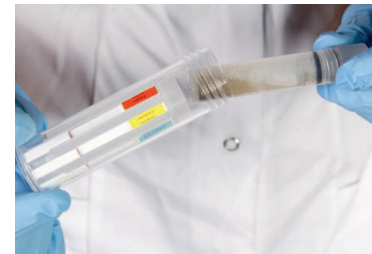

6. Push the test tube in the test bottle and push it to the bottom until you feel a click.



7. Close the test bottle and wait for 10 minutes. The fluid will run over the test strips. After 10 minutes the control lines will appear on each strip. If the testline also becomes visible, the test is positive. If only the control line is visible, the test is negative.

